

Baylis

Апарат штучної вентиляції легенів V4C-560

УКР Коротка інструкція з експлуатації і контент

Baylis

Апарат штучної вентиляції легенів V4C-560

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: НЕ використовувати без установки вхідного фільтра


УВАГА: Налаштування оновлені вручну для використання в умовах стаціонару. Відновлення параметрів за замовчуванням призведе до повернення налаштувань для використання в домашніх умовах.

ПАРАМЕТРИ СТАЦІОНАРНОГО ВИКОРИСТАННЯ: Режим: V A/C, Дихальний об'єм: 350 мл, **Тиск:** 5 см H₂O, Частота дихання: 20 ударів в хвилину, Час вдиху: 0,8 с.

УВАГА: Якщо акумулятор утримується поза апаратом штучної вентиляції легенів, зверніться за установкою акумулятора до уповноваженого представника служби підтримки клієнтів.

Для включення апарату штучної вентиляції легенів:

Встановіть перемикач «I/O» (**Вкл.-Викл.**(живлення) (закритий перемикач типу гойдалки, розташований на тильній стороні апарату штучної вентиляції легенів) у положення I, як показано нижче:

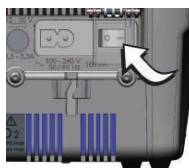

Щоб змінити мову на апараті штучної вентиляції легенів, спочатку відкрийте «Setup Menu» (Меню Налаштування):

Натисніть і утримуйте клавішу «ALARM CONTROL» (УПРАВЛІННЯ СИГНАЛІЗАЦІЄЮ), переводячи перемикач включення-виключення у положення «ON» (Вкл.) (I). Утримуйте клавішу, поки не з'явиться екран «Setup» (Налаштування) (приблизно три секунди).

Відпустіть клавішу «ALARM CONTROL» (УПРАВЛІННЯ СИГНАЛІЗАЦІЄЮ).

Щоб змінити мову,

1. Натисніть «UP» (ВГОРУ) або «DOWN» (ВНИЗ), щоб встановити курсор поруч із змінним параметром.
2. Натисніть клавішу «ENTER» (ОБРАТИ), щоб змінити курсор на:
 - Курсор зміниться на: ±
 - Вибране значення параметра блимає.
3. Натисніть «UP» (ВГОРУ) або «DOWN» (ВНИЗ), щоб змінити значення вибраного параметра.
4. Натисніть клавішу «ENTER» (ОБРАТИ), щоб підтвердити нове вибране значення. Для виходу з «Setup Menu» (Меню Налаштування),

Встановіть перемикач «I/O» (вводу-виводу) на задній панелі апарату у положення «OFF» (Викл.) (O).

КОНТЕНТ

Вміст пакування:

Кількість	Компонент	Номер за каталогом Baylis
1	Апарат штучної вентиляції легенів Baylis V4C-560	V4C-560
10	Повітряний фільтр	B-10028771
10	Блоки видиху (один попередньо встановлений в апараті штучної вентиляції легенів)	B-10046803
1	Роз'єм для подачі кисню	B-2962799
1	Кабель живлення	B-2977099
1	Набір для вимірювання FiO ₂	B-3814199
1	Інструкція по використанню Компакт-диска/USB	Відсутній
1	Вбудований акумулятор	B-V4C-560-BATT
1	Ключ T10 Torx	Відсутній
1	Кабель живлення -Україна	Відсутній

КОМПОНЕНТИ З ОБМЕЖЕНИМ ТЕРМІНОМ ПРИДАТНОСТІ

Даний продукт містить компоненти з обмеженим терміном придатності та/або обслуговування. Зверніться до «ПОСІБНИКА ЛІКАРЯ» для отримання повного списку компонентів і їх конкретних вимог.

© 2019 Covidien. Всі права захищені.
Поправки © 2020 Baylis Medical Technologies Inc. Всі права захищені.
Логотип Baylis MedTech є зареєстрованою торговою маркою Baylis Medical Technologies Inc у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.^{™*} Бренди є товарними знаками їх відповідних правовласників. Всі інші бренди є товарними знаками компанії Covidien або Medtronic Plc або її дочірніх компаній або афілійованих осіб.
Baylis Medical Technologies Inc
Бульвар Метісон, 2645. Схід, Міссіссіга,
Онтаріо L4W 5S4 Канада
www.baylismedtech.com [Т] +1 (905) 948-5800